

MODO DE EMPLEO  
**PASO**  
*a* **PASO**

1



Saque el Dechoker de su envoltorio, y rápidamente tire del émbolo una o dos veces. Mientras, tranquilice al accidentado avisando de que el Dechoker está siendo preparado.

2



Tumbe a la víctima de espaldas, inclínele la cabeza elevándole la barbilla para tener acceso sus vías respiratorias.

3



Inserte el tubo azul en la boca deslizándolo por encima de la lengua y coloque la mascarilla tapando boca y nariz. Presione con suavidad pero con firmeza para crear un espacio estanco.

4



Presionando ligeramente la máscara, tire del émbolo hacia arriba con fuerza para succionar el objeto y deshacer la obstrucción.

5



Si la obstrucción persiste, repita los pasos 4 y 5, y sepa que puede tirar del émbolo varias veces para conseguir una succión adicional si fuera necesario.

6



No deje nunca que el respirador cubra boca y nariz durante más de 3 segundos seguidos, en ninguna de las etapas. Cuente hacia atrás: 3-2-1.

7



Una vez que los restos han salido, coloque al individuo de costado para permitir la salida de líquido u otros desechos de la boca.